

インプラントリムーバー

Implant Remover

1 アクセスホールに
合わせ
リムーバーの
先端をカット



2 リムーバーを
インプラント体
アクセスホール
に挿入

反時計回りに
締結

3 締結完了

さらに
反時計回りに
回す

4 歯槽骨より
インプラント
除去

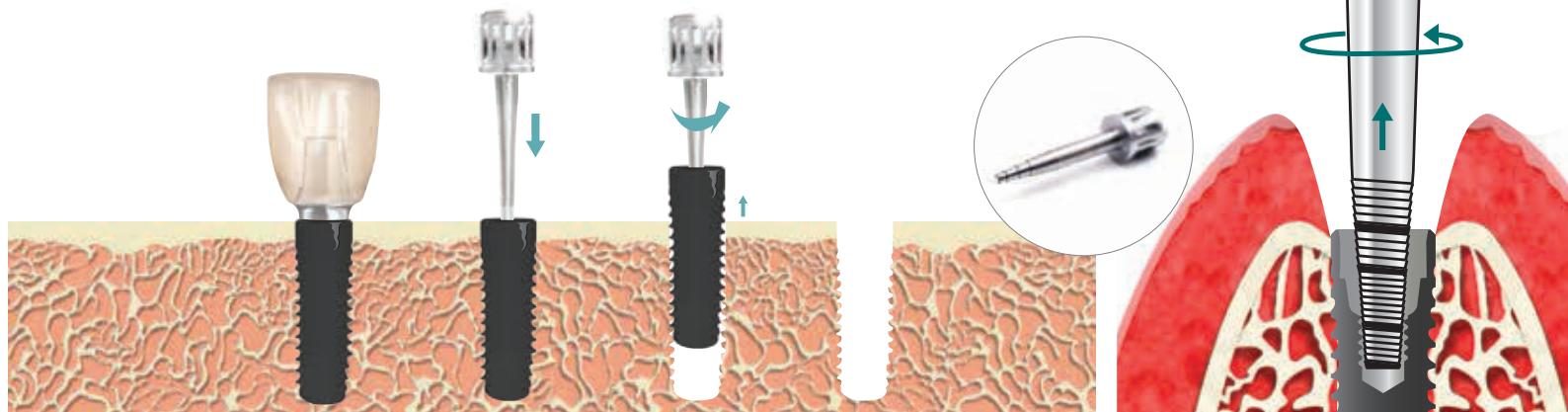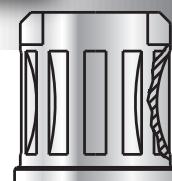


アバットメントスクリュー除去



*ネジ山が破損した
アバットメントスクリュー除去

インプラント除去

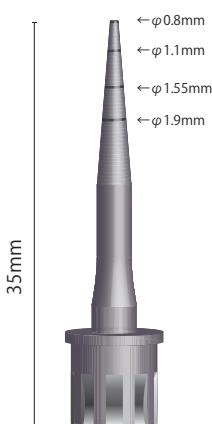


インプラントリムーバー：ロング

品番：eb000001

標準価格：¥ 15,000 (税込 ¥ 16,500)

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000837

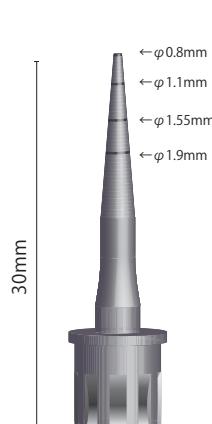

インプラントリムーバー：ショート

品番：eb000002

標準価格：¥ 15,000 (税込 ¥ 16,500)

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000837

シンプルトルクレンチ

品番：eb000006

標準価格：¥ 30,000 (税込 ¥ 33,000)

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000842

2022年6月改訂(第3版)

輸入販売元

**MICRO
TECH**

株式会社マイクロテック <http://www.micro-t.jp>

〒111-0036 東京都台東区松が谷1-8-9

TEL: 03-5827-1380 FAX: 03-5827-1381 E-MAIL: info@micro-t.jp

