

オコクリーナー

歯牙エナメル質を傷つけることなく
プロフェッショナルな仕上げが可能です



着色除去前



着色除去後

用途

- ・歯牙表面の着色・ステイン除去
- ・余剰セメントの除去
- ・インプラントに付着した歯石の除去・メンテナンス
- ・コンポジット充填物の研削
- ・ブラケット除去後のボンディング材除去


セルフシャープニング

研削により、レジン基質を使い切った時、14ミクロンのジルコンを豊富に含んだ新しいグラスファイバーの部分が露出し、研削効率を持続させます。

※許容回転数：10,000rpm ~ 15,000rpm 以下
(注水下及びわずかな圧力で使用すること)
※オートクレーブ滅菌：121° 以下



アソートキット

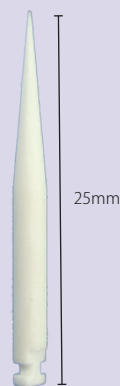


No.1




No.2



No.3

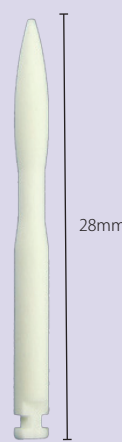

No.4

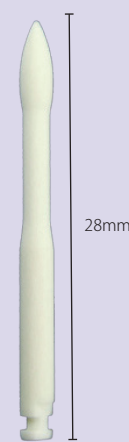

No.5

品番	ok000001	ok000002	ok000003	ok000004	ok000005	ok000006
標準価格	¥ 5,200 (税込 ¥ 5,720)	¥ 5,200 (税込 ¥ 5,720)	¥ 5,200 (税込 ¥ 5,720)	¥ 5,200 (税込 ¥ 5,720)	¥ 5,200 (税込 ¥ 5,720)	¥ 5,200 (税込 ¥ 5,720)

*アソート梱包デザインは予告なしで変更になる場合があります。

*No.1~No.5：単品(5本入)

2022年6月改訂(第3版)
一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000636

