

WiFi 口腔内撮影用カメラ
マイクロカメラ TS-401 取扱説明書
Micro Camera



本製品を正しく安全にお取扱いいただくため、使用前に必ずお読み下さい。

適合機器

「iOS9.0」又はそれ以上のバージョン


目次

- ・お使いになる前に・・・P1
- ・各部名称・・・P2
- ・アプリダウンロード・・・P2
- ・WiFi 接続方法・・・P3
- ・inskam アプリ設定画面・・・P4-5
- ・仕様・・・P6
- ・保証・・・P7
- ・トラブルシューティング・・・P7
- ・本品廃棄について・・・P7

お使いになる前に

付属充電台、USB ケーブル、AC アダプターとカメラ本体を接続し充電します。

各部名称

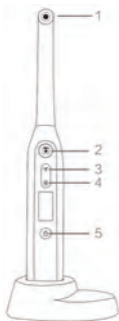

1. カメラ部
2. 撮影ボタン
3. ズームインボタン
4. ズームアウトボタン
5. 電源ボタン:長押ししてON/OFF

【セット内容】

- ・カメラ本体（ハンドピース）×1
- ・専用充電台×1
- ・USB ケーブル×1
- ・専用ディスプレイカバー×20
- ・ACアダプター×1
- ・取扱説明書×1

アプリダウンロード

【iOS】

App Store で「[inskam](#)」を検索し、アプリをインストール






《注意》

「すべての写真へのアクセスを許可」を押してください。

動画が「記録ファイル」に保存されます。

「写真を選択 ...」「許可しない」を選択すると動画は保存されません。

WiFi 接続方法

1. 電源ボタンを 3 秒間長押し、マイクロカメラを起動させます。
2. スマートフォン / タブレットの設定アイコンから「WiFi」を選択します。
3. 「MicroCamera-XXXX」を選択し、初回のみパスワード『12345678』を設定 / 接続します。
4. WiFi 接続後、「inskam」アプリ  を選択してください。

inskam アプリ設定画面



解像度設定 . . . アイコン【A】を押し、解像度を選択します。

言語設定 . . . アイコン【B】を押し、言語を選択します。

撮影方法

静止画：本体ボタン又はアプリ内静止画アイコン【C】を押します。

動 画：本体ボタンを長押し、又はアプリ内アイコン【D】を押します。

静止画 / 動画 確認方法

スマートフォン / タブレット内の「記録ファイル」【E】で一覧出来ます。

2画面モード . . . 静止画 / ライブ映像を同時に確認出来ます。【F】

回転 . . . ライブ映像を回転させることが出来ます。【H】

(注)「回転」で撮影したデータでは保存されません。

ズーム機能

- a: ライブ映像を拡大する場合、本体のズームインボタンを繰り返し短く押します。(×1.0、×1.2、×1.4、×1.6、×1.8、×2.0)
- b: 縮小する場合は、本体のズームアウトボタンを押してください。
- c: スマートフォン / タブレット内でも「拡大」「縮小」が調整出来ます。【G】

(注)「拡大」で撮影したデータでは保存されません。


仕様

ネットワーク規格	IEEE 802.11b/g/n
アンテナ	内臓IPEX アンテナ
動作周波数	2.4 GHz
データ転送速度	300 Mbps以下
画像センサー	相補型MOS
カメラ光源	LED光源8灯
作動温度	0°C~45°C
電池種類	1000mAhリチウム電池
連続使用時間	2 時間
充電時間	1.5時間
本体重量	61g
本体長	21.2cm
カメラレンズ部寸法	幅:1.2cm / 厚み:0.8cm
ハンドル部直径	2.8cm
充電台サイズ	幅:7.8cm x 奥行:5.3cm x 高さ:2.5cm
充電台重量	21g
附属USBケーブル長	80cm
電源入力	DC 5V 500 mAh または1A
焦点距離	5mm~10mm
カメラ最大解像度	1920 x 1080P
センサーピクセルサイズ	200万画素
視野角	70 °
対応可能OS	iOS

保証

- 保証期間：購入日より**6ヶ月間**です。
※なお、以下の場合は保証対象外となります。
- 専用付属品以外の部品等を使用し故障した場合
- 製造元以外での修理・改造
- 本書記載以外の誤った使用で不具合が生じた場合
- 本体の落下や衝撃を与えた場合の機器損害や故障
- 地震、洪水、雷、大気汚染、電圧不適合、電圧ノイズ等による機器損害や故障

トラブルシューティング

症状	原因と対策
「MicroCamera-XXXX」WiFiが見つからない	1. 充電残量を確認してください。残量が低い場合は充電してください。 2. inskamアプリをタップし、マイクロカメラを再起動させてください。
アプリが起動しない	1. スマートフォン/タブレットのWiFi設定、本体機器の接続を確認してください。 2. スマートフォン/タブレットとマイクロカメラのWiFi接続を一旦切り、再接続してください。 3. アプリを閉じて再度開いてください。
動画が保存されない	スマートフォン/タブレットの設定よりinskamアプリをタップ。 「すべての写真」を選択することで動画が記録ファイルに保存されます。 

本品廃棄について

- 医療機器及び電気、電子製品の廃棄規則及び各地方自治体の規則に則り、廃棄又はリサイクルしてください。

製造販売元

MICRO 株式会社
MITECH マイクロテック

〒111-0036

東京都台東区松が谷1-8-9

TEL : 03-5827-1380 FAX : 03-5827-1381

EMAIL : info@micro-t.jp

WEBSITE : www.micro-t.jp

